

# Bedienungsanleitung

## Beach-Chair Head-Support

Der Beach-Chair Head-Support ist eine Alternative zu den herkömmlichen Kopfkalotten der verschiedenen OP-Tischen. Das moderne Profil ist an den Kopfteil der Beach-Chair-Schiene optimal angepasst. Der Adapter auf der Unterseite passt auf die OP-Tischmodellen von Maquet, Schaerer, Schmitz und Trumpf. Damit ist das BCS-System komplettiert.



- A** Adapter
- B** Head-Support
- C** Aufnahme für Schaerer beidseitig
- D** Aufnahme für Maquet, Trumpf, Schmitz
- E** Schraubgriff

### Lieferumfang / Technische Daten

Adapter mit Head-Support für verschiedene OP-Tischmodelle

Material: Aluminium / Kunststoff

Dimensionen: 8 x 21 x 10 cm (H x B x T), Höhe inkl. Adapter: 13 cm

### Bedienung

1. Anbringen des Head-Support an die jeweilige Kalottenhalterung
2. Auflegen der Beach-Chair Schiene
3. Anpassen der Höhe, Auflagefläche und Neigung

### Reinigung / Wartung

Wischdesinfektion mit INCIDIN OXI WIPE S von Ecolab oder ähnliche. Kein chlorhaltiges Produkt verwenden.

**Achtung!** Mit anderen Lösungsmitteln wie Meliseptol Rapid, Aceton, Nitro-/ Verdünner, Nagellackentferner usw., löst sich die Beschichtung auf! In diesem Fall lehnt, die Firma Samarit Medical AG, jegliche Haftungsansprüche ab.

### Entsorgung

Material getrennt und sachgerecht entsorgen.

### Garantie

2 Jahre (Bei Handhabung gemäss Bedienungsanleitung)