



SAMARIT
improving patient care

Systemes de transfert SAMARIT "no lift"

Rollbord™

PROFESSIONAL

Le moyen sûr de transférer les patients

Exigées par la loi dans certains pays, allant de soi dans d'autres – les conditions de travail doivent être les plus confortables possibles. Le personnel de santé doit éviter tout mouvement de levage lors du transfert des patients. **Les produits SAMARIT** facilitent le transfert, sans qu'il soit nécessaire de soulever le patient. Les produits sont conçus pour faciliter le transfert avec peu d'effort, ce qui rend le travail plus agréable pour les personnels soignants et protège leur dos.

L'utilisa-
tion in-
tensive!

STANDARD

pliable



*SWL: 180 kg
*SWL: 397 lbs

Convient à la radiologie, au bloc opératoire, aux unités de soins intensifs, et à tous les services particuliers.

Dimensions: 180 x 50 cm, 89 x 50 cm, 2.9 kg

Revêtement antibactérien, antifongique, ignifugé, sans danger pour la peau, doté de terminaisons de sécurité et facile à nettoyer.

Réf. de commande 440.2100
UDI/GTIN: 7640144460143

MRI

pliable



*SWL: 180 kg
*SWL: 397 lbs

Convient au bloc opératoire, à la radiologie, à divers services (remplace les roulettes en aluminium).

Dimensions: 180 x 42 cm, 90 x 42 cm, 2.3 kg

Revêtement antibactérien, antifongique, ignifugé, sans danger pour la peau, doté de terminaisons de sécurité et facile à nettoyer.

Réf. de commande 440.2300
UDI/GTIN: 7640144460150

AMBULANCE

pliable



*SWL: 150 kg
*SWL: 331 lbs

Convient aux blocs opératoires d'urologie et de gynécologie, aux salles de réanimation et aux services d'urgences.

Dimensions: 165 x 42 cm, 82 x 42 cm, 1.9 kg

Revêtement antibactérien, antifongique, ignifugé, sans danger pour la peau, doté de terminaisons de sécurité et facile à nettoyer.

Réf. de commande 440.2400
UDI/GTIN: 7640144460167

*SWL = Safe Weight Limit

3 modèles différents convenant à chaque application hospitalière

- Hautes performances
- Radiotransparent
- Non toxique et traité contre les bactéries
- Transfert sécurisé des patients
- Confortable pour les patients
- Évite au personnel soignant les lésions du dos
- Sans danger pour la peau (sans latex)
- Facile à nettoyer/désinfecter - conforme aux normes d'hygiène
- Couvertures à utilisation uniques
- Tissu en nylon résistant aux déchirures
- Peut recouvrir des vides atteignant 20 cm
- Ultra-légère, facile à suspendre

MINI

Non pliable



*SWL: 150 kg
*SWL: 331 lbs

Convient aux blocs opératoires d'urologie et de gynécologie, aux salles de réanimation et aux services d'urgences.

Dimensions: 80 x 50 cm, 1.4 kg

Revêtement antibactérien, antifongique, ignifugé, sans danger pour la peau, doté de terminaisons de sécurité et facile à nettoyer.

Réf. de commande 440.2200
UDI/GTIN: 7640144461201




COUVERTURE

Convient à tous les modèles



Pour protéger les modèles Rollbord du sang et de la saleté. **Dimensions:**
 200 cm, Ø 60 cm (50 pcs)
 135 cm, Ø 60 cm (74 pcs)

200 cm Réf. de commande 440.1000
 UDI/GTIN: 7640144460471
 135 cm Réf. de commande 440.1400
 UDI/GTIN: 7640144460488

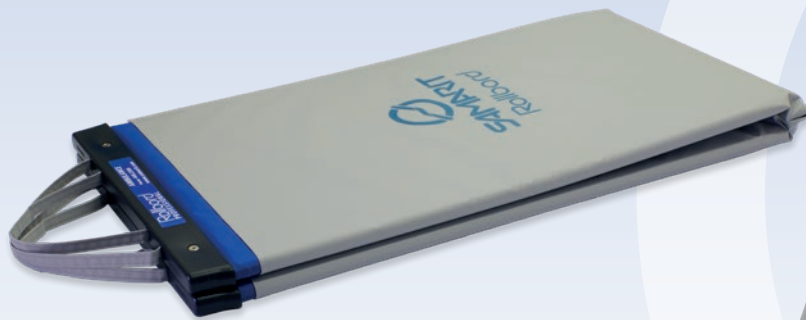

Les systèmes de transfert "no lift" SAMARIT facilitent le travail quoti- dien auprès des patients

SAMARIT apporte également confort et sécurité aux patients

Dans les hôpitaux, où les patients doivent parfois être transférés précautionneusement plusieurs fois par jour, SAMARIT facilite le travail du personnel soignant et apporte davantage de confort aux patients.

Les systèmes de transfert SAMARIT - une aide précieuse au personnel soignant - dans le monde entier !

Si vous imaginez combien de transferts sont effectués chaque jour dans les hôpitaux et les établissements de soins, vous apprécierez la vraie valeur des systèmes SAMARIT originaux. En fait, plus de 150 000 systèmes de transfert SAMARIT sont utilisés par des infirmiers dans le monde entier. Chacun d'eux trouve le travail plus facile avec les produits SAMARIT.



ne pèse que 3 kg et peut être mis en place rapidement - partout

Le moyen sûr et sécurisé de transférer les patients

Rollbord™ **PROFESSIONAL**



Tournez le patient sur le côté, faites glisser la planche sous le corps et ramenez le patient dans sa position initiale.



Poussez doucement le patient par son épaule et sa hanche, sans forcer, et transférez.



Tournez le patient sur le côté. Retirez le Rollbord à partir des pieds.

Un matériau respectueux de l'environnement* Les équipements de transfert SAMARIT sont constitués de matériaux respectueux de l'environnement. Ils peuvent être jetés sans nuire à l'environnement et ne produisent pas de fumée toxique en cas d'incendie.

* Matériau lisse recouvert de Téflon autour d'un noyau de mousse polyéthylène, tissu de polyester enduit, extrémités en PE.

Facile à nettoyer

La planche de transfert Rollbord peut être nettoyée de préférence avec des *lingettes Clean* ou un désinfectant hospitalier. Lorsque vous prévoyez des conditions salissantes, utilisez le drap jetable Rollbord. Il recouvre les extrémités de la planche de transfert et permet de replier les résidus sans les toucher à l'intérieur du drap en laissant une surface propre. Les réparations ne peuvent être effectuées que par du personnel agréé (garantie).

Des normes de haute qualité

Les équipements de transfert SAMARIT bénéficient du :

- marquage CE
- Brevets d'invention

EU-SRN: CH-MF-000016280
CHRN: CHRN-MF-20000184

www.samarit.com

Demandez aussi les brochures des autres produits SAMARIT !



SAMARIT Rollbord Hightec



SAMARIT Rollbord ECOLite



SAMARIT Transglide



Équipement de soins infirmiers SAMARIT

Téléchargez sur notre site une brochure dans votre langue ou adressez-vous à votre distributeur local.

SAMARIT
improving patient care

Samarit Medical AG

Gewerbestrasse 12
CH-8132 Egg, Schweiz

Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39

e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com

