

SAMARIT

safe patient moving & handling



For
HEAVY
use!

Das handliche, preisgünstige Umlagerungs-System

SAMARIT Transglide rundet unser Programm mit den führenden "Rollbord" und "Rollbody" auf ideale Weise ab. Die grossen **Hilfen in Pflegeheimen, Kliniken** und bei der **Pflege zuhause**.

SAMARIT **TRANSGLIDE** LATERAL TRANSFER

LARGE
PATGLIDE
SMALL
ACCIDENT & EMERGENCY*

Highlights:

- handliche Bedienung durch eine oder zwei Pflegepersonen
- leicht, wiegt nur 3,5 kg
- aus solidem, bruchfestem und ökologisch sowie toxikologisch unbedenklichem Material (HDPE), antistatisch
- rückseitig mit Sicherheitsstreifen (3M) versehen
- braucht wenig Platz: kann an der Wand aufgehängt werden
- hoch gleitfähige Oberfläche
- pflegeleicht, säurebeständig
- röntgenstrahlendurchlässig
- günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

Auch zur Herzreanimation auf dem Bett verwendbar

*Nur auf besondere Bestellung

SAMARIT

Samarit transfer systems


In Top-Qualität mit hoch gleitfähiger Oberfläche.



SWL*:
220 kg / 485 lbs

LARGE

Grösse: 170 x 65 cm
Order No. 471.1170
UDI/GTIN: 7640144460501

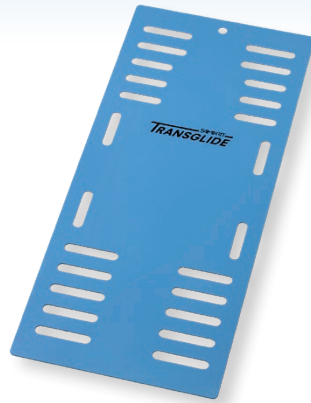

SWL*:
220 kg / 485 lbs

PATGLIDE

Grösse: 152 x 63 cm
Order No. 471.5263
UDI/GTIN: 640144460518



SWL*:
220 kg / 485 lbs

SMALL

Grösse: 140 x 48 cm
Order No. 471.1140
UDI/GTIN: 7640144460525



SWL*:
220 kg / 485 lbs

ACCIDENT & EMERGENCY

Grösse: 140 x 48 cm
Order No. 471.1180
Nur auf besondere Bestellung

GEBRAUCHSANWEISUNG



Drehen Sie den Patienten mit dem "Ziehtuch" sorgfältig in Seitenlage, schieben den Transglide unter das Tuch und legen ihn auf das Transglide zurück. Fassen Sie das "Ziehtuch" mit beiden Händen und halten den Rücken gerade und aufrecht.

SAMARIT Produkte; machen die Arbeit einfacher und der Rücken wird geschont. SAMARIT bringt den Patienten aber auch Komfort und Sicherheit.

Transglide zeichnet sich durch Einfachheit, Dauerhaftigkeit und einen günstigen Preis aus.



Ziehen Sie den Patienten mit dem Tuch über das Transglide gleichmässig und mit geradem Rücken. Die zweite Person unterstützt den Vorgang durch leichtes Stossen.


Reinigung
Diese erfolgt vorzugsweise mit Ecolab: Sani-Cloth Active Reinigungstücher.

Umweltverträgliches Material
HDPE ist leicht entsorg- und wiederverwendbar. Im Brandfall gibt es keine toxischen Dämpfe ab.



Erreicht der Patient die richtige Position auf dem Bett / der Liege / dem Röntgentisch usw., drehen Sie den Patienten leicht zur Seite und die zweite Person zieht das Transglide am Fussende mit einer leichten Drehung unter dem Patienten weg.

Platzsparendes Lagern
Transglide wird mit Vorteil an der dafür vorgesehenen Kerbe an einem Haken an der Wand aufgehängt.

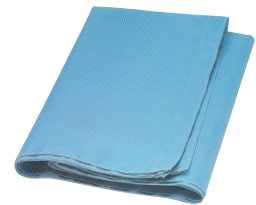

ZIEHTUCH

strapazierfähigem Nylon
Grösse: 150 x 150 cm
Order No. 471.1200
UDI/GTIN: 7640144460532

PS: Durch Entfernen der Antirutschstreifen kann der Patient auch auf dem Transglide liegend umgelagert werden und während der Behandlung auf dem Transglide liegen bleiben (z.B. beim Röntgen).

Hohe Qualitätsmaßstäbe
SAMARIT Umlagerungssysteme besitzen:

- das CE-Zeichen
- Design-Patente
- 2 Jahre Garantie



*SWL = Safe Weight Limit

www.samarit.com

Verlangen Sie auch die separaten Broschüren weiterer Produkte von SAMARIT!

SAMARIT
safe patient moving & handling

SAMARIT Medical AG
Gewerbstrasse 12
CH-8132 Egg, Schweiz
Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39
e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com

SAMARIT
TRANSGLIDE
LATERAL TRANSFER