


- Cirugía de hombro
- Prótesis de hombro
- Brazo y clavícula
- Osteosíntesis
- Uso múltiple p. 2

SAMARIT
safe moving and handling

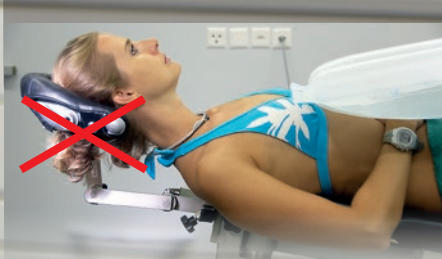

Antes, sólo con calota de cabeza

Ahora, posición Beach-Chair!


- El cojín especial de nuevo desarrollo permite una posición ergonómica óptima para la cabeza, el cuello y la espalda.
- Mejor intubación en posición supina o posición Beach-Chair.
- El dispositivo BEACH-CHAIR se fija al paciente con el cinturón torácico. La correa para la barbilla y la cinta para la cabeza con acolchado se utilizan para colocar la cabeza de forma segura.
- Simplifica y acorta el posicionamiento y el tiempo necesario empleado.
- Los pacientes tienen menos molestias postoperatorias en la zona del cuello y de la nuca.
- El dispositivo BEACH-CHAIR protege la columna vertebral si se retira por error la calota de cabeza y evita el contacto metálico con ésta.



«**BEACH-CHAIR**» – el dispositivo, posicionamiento seguro en el quirófano.

El dispositivo BEACH-CHAIR se ha diseñado para ayudar al personal anestesista durante la intubación. Con él se logra un posicionamiento cómodo y seguro del paciente y un gran ahorro de tiempo para el personal.

El dispositivo BEACH-CHAIR se ha desarrollado aunado la experiencia práctica de los especialistas en posicionamiento y el conocimiento tecnológico de Samarit Medical AG.

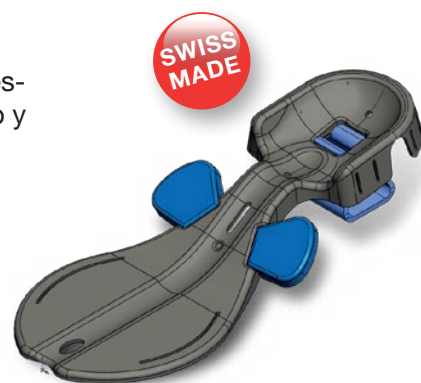



Simplicidad de uso.

Legenda

- A. Dispositivo BEACH-CHAIR
- B. Nuevo cojín ergonómico
- C. Alas extraíbles a ambos lados
- D. Planchas de tórax con correas
- E. Fijación trapezoidal
- F. Cavidad para la columna vertebral
- G. Almohadilla desechable para la fijación de la barbilla y la frente

El dispositivo BC está fabricado con un **plástico especial**, es radiotransparente, no contiene metal ni látex.

El nuevo cojín **ergonómico para la cabeza, el cuello y la espalda** permite un posicionamiento óptimo.

El dispositivo BC dispone de dos **alas de soporte para los hombros** que pueden retirarse individualmente.

Cuando se utiliza el dispositivo BC en una **mesa de operaciones**, la **sujeción de la cabeza** se fija en altura con la **fijación trapezoidal**.

Correas regulables a ambos lados



Dos **planchas de tórax** en combinación con unas correas seguras aumentan la estabilidad del tórax.


Cintas para fijar la barbilla y la frente



Alas regulables para cirugía abierta y cerrada del hombro




Fijación trapezoidal para uso en mesas de operaciones

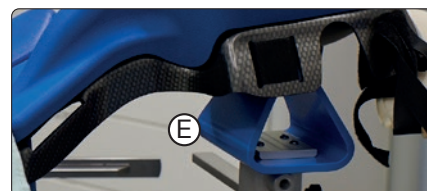

El dispositivo BEACH-CHAIR también se puede emplear para operaciones sin posición Beach-Chair, por ejemplo, para:

- Cirugía facial
- Carótida
- Estruma

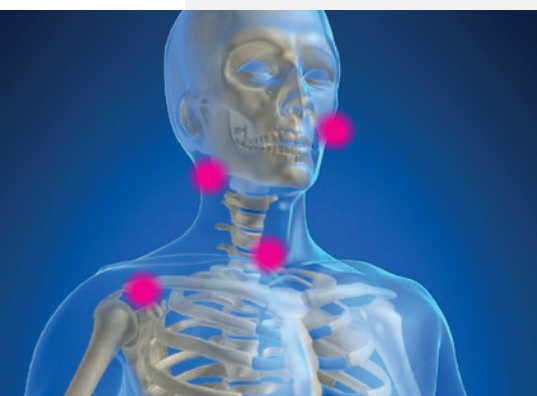



Múltiples aplicaciones.

Los problemas son conocidos - ahora tenemos la solución.



Antes, sólo con calota de cabeza



Ahora, con el dispositivo BEACH-CHAIR



La solución

Samarit ofrece la solución


Después de largas operaciones, los pacientes se suelen quejar de fuertes dolores en el cuello/nuca y la cabeza. A menudo es el resultado de una posición incorrecta o de la falta de apoyo para el cuello sin nuestro cojín ergonómico BC.

El dispositivo BEACH-CHAIR ofrece seguridad, mejora el posicionamiento y evita los puntos de presión.

El dispositivo BEACH-CHAIR soluciona los conocidos problemas de posicionamiento para el personal quirúrgico.


El dispositivo BEACH-CHAIR llena el hueco existente entre la mesa de operación y la calota de cabeza, evitando riesgos innecesarios.

El dispositivo BEACH-CHAIR, esta ingeniosa invención, tiene múltiples aplicaciones, su uso es sencillo, seguro para los operadores y anestesistas y cómodo para los pacientes.

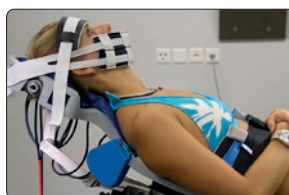

BEACH-CHAIR

SAMARIT
safe moving and handling

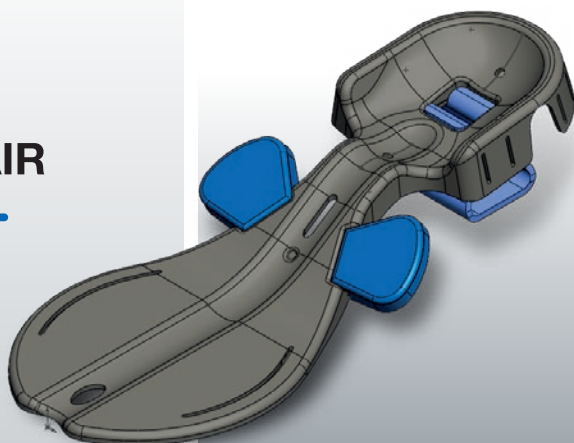

Los casos de responsabilidad civil son un problema evitable en el ámbito del posicionamiento.

Pruebe nuestro producto de eficacia probada y solicite una demostración con presupuesto.



Dispositivo BEACH-CHAIR

(incl. 5 juegos de consumibles)

Nº de modelo 420.2002

Consumibles (juego de 10 uds.)

Contenido del juego (productos desechables) Nº de modelo 420.0010 B

- ① 1 Almohadilla para la frente, ② 1 Almohadilla para la barbilla,
③ 2 Almohadillas para el tórax, ④ 1 Almohadilla para alas



Cojín antideslizante BC patentado



Small
Nº de modelo 420.2020



Cojín suplementario de grosor para Small y Big
Nº de modelo 420.2030



Big
Nº de modelo 420.2040

www.samarit.com



Rollbord™



Blue Transfer Board



TRANSGLIDE



Glidebord

Si desea más folletos de productos Samarit, póngase en contacto con nosotros, con su distribuidor especializado o descárguelos en su idioma de nuestra página web.

SAMARIT
safe moving and handling

Samarit Medical AG

Gewerbestrasse 12

CH-8132 Egg, Schweiz

Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39

e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com

